

Kurze Anleitung zur „Blutproben-Karte“ beim Rottweiler


1. Vorbereitung

- a. Pro Hund/Welpe wird eine (1) Karte **1** mit Probenmaterial, hier Blutropfen, bestückt.
- b. Die Proben-Karte **1** mit Chip-Etikett **2** und der Zuchtbuchnummer des Hundes kennzeichnen.
- c. Legen Sie sich die geöffnete Verpackung mit Einmal-Alkoholtupfer **3**, Einmal-Sicherheits-Lanzette **4** und Proben-Karte, ggf. Einmalhandschuhe, entsprechend bereit.
- d. Bitte Probenaufnahmefläche (Karte: Saugfähige Oberfläche) nicht berühren oder Hunde daran schnuppern/lecken lassen, bzw. auf den Boden werfen.



2. Gewinnung der Blutprobe*

- e. Desinfizieren bzw. reinigen Sie mit dem beigegefügten Einmal-Alkoholtuch zunächst die fast haarfreie Innenseite des Hundeoehres.
- f. Indem Sie die Ohrmuschel etwas mit der Hand massieren, wird die Durchblutung verbessert.
- g. Mit der beigegefügt **Einmal-Lanzette** (vorher die Schutzkappe abnehmen! **5**) piksen **6** Sie durch kurzes Aufdrücken **der Lanzette einmal in die gereinigte Ohrhaut**, ggf. gut erkennbaren Blutgefäßbereich. Den austretenden Blutropfen bitte auf das vorgesehene Feld der Proben-Karte aufbringen. **7**. Das saugfähige Material an der Karte nimmt das Blut durch Auftupfen gut an **8**. Lassen Sie das Blut wenige Minuten einziehen und antrocknen. (NICHT mit den Fingern verschmieren, KEINESFALLS im Sonnenlicht trocknen lassen)
- h. Mindestens ein grösserer Tropfen oder mehrere kleinere Tröpfchen sind ausreichend.
- i. Packen Sie die bestückte Blutprobenkarte, incl. aufgeklebtem Chip-Etikett, und vermerkter Zuchtbuchnummer wieder in die schützende Plastiktüte.
- j. Die Beprobung ist abgeschlossen.

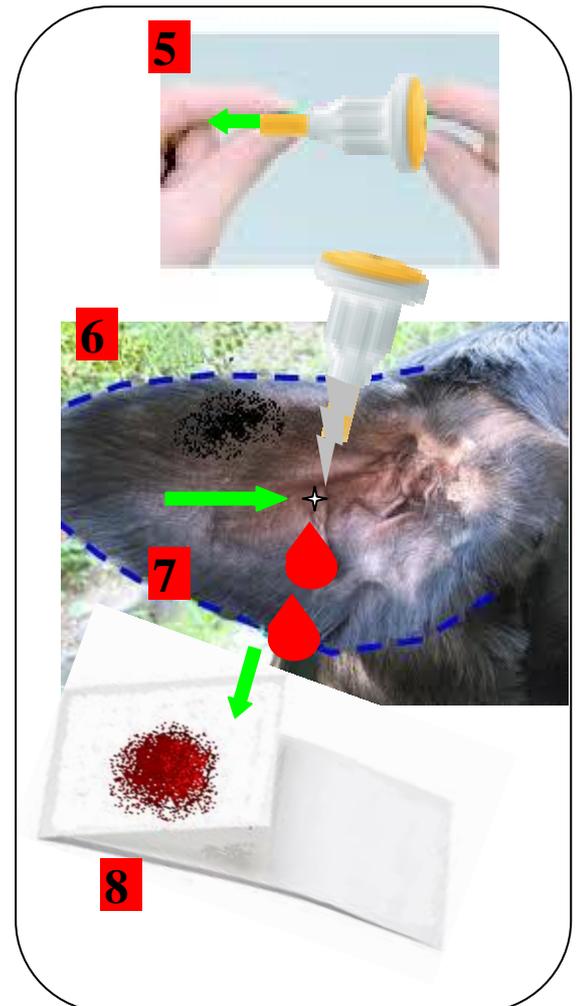

(*Sämtliche hier beschriebenen Vorgänge erfolgen auf eigenes Risiko/Verantwortung)